



NO INHALAR durante la aplicación

porque puede intensificar la sensación de picor, ardor, estornudos, lagrimeo o aumento de las secreciones nasales, los cuales son efectos normales y pasajeros debido al modo de acción de Nasodren®

**POR FAVOR
LEA DETENIDAMENTE EL
PROSPECTO ANTES DE USAR
NASODREN®**

Nasodren® Nebulizador nasal

DRENA LAS MUCOSIDADES Y LIMPIA LA NARIZ Y LOS SENOS PARANASALES

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción del producto

Nasodren® es una solución acuosa preparada a partir de un extracto natural de tubérculos frescos de Cyclamen europaeum L. sin ingredientes ni conservantes añadidos.

Contenido. Cada envase de Nasodren® contiene:

- 1 vial (A) con Extracto liofilizado de Cyclamen;
- 1 ampolla (B) con Agua para disolver el liofilizado;
- 1 boquilla de pulverización.

Composición cualitativa y cuantitativa:

- Vial A: Extracto liofilizado de Cyclamen europaeum L., 50 mg;
- Ampolla B: Agua, 5 ml

Uso previsto y beneficio clínico

Nasodren® es un nebulizador nasal que se utiliza para drenar las mucosidades y limpiar la nariz y los senos paranasales.


Precauciones antes de utilizar Nasodren®

Si está tomando anticoagulantes y/o anticolinérgicos, no utilice Nasodren® sin consultar antes con su médico. La solución obtenida a partir de la mezcla debe pulverizarse solo una vez al día en cada fosa nasal, preferiblemente, en el mismo momento del día, unas 2 horas antes de acostarse. Utilizar el producto más de una vez al día no mejora su eficacia y debe evitarse. El nebulizador debe utilizarse durante un periodo de 7 a 10 días, que podría alargarse hasta 14 días, en caso necesario. Después de esto, se deben dejar transcurrir otros 7 a 10 días antes de volver a utilizar el producto. Nasodren® puede utilizarse en adultos y en niños mayores de 12 años. En niños se usará bajo supervisión de un adulto. No utilice Nasodren® si es alérgico (hipersensible) a Cyclamen, Primula y otras Primuláceas.

Instrucciones de uso

Nasodren® solo debe utilizarse en la nariz.

Siga las instrucciones que se detallan a continuación y consulte las imágenes para mezclar los constituyentes del producto antes de pulverizarlo en las fosas nasales.

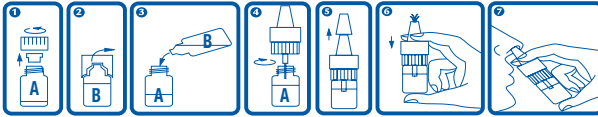

Cómo preparar la solución

1. Abra el vial que contiene el polvo (A); para ello, gire el tapón exterior en sentido antihorario y retire el tapón interior.
2. Rompa la parte superior del frasco de plástico que contiene el agua (B).
3. Vierta todo el líquido (B) en el vial que contiene el polvo (A).
4. Enrosque la boquilla de pulverización en el vial (A) y agite suavemente hasta la completa disolución. Espere hasta que desaparezca la espuma.
5. Retire el tapón protector de la boquilla de pulverización.
6. Antes de utilizarlo por primera vez en la nariz, presione 2 o 3 veces la boquilla de pulverización en el aire, lejos del cuerpo, evitando el contacto con los ojos.

Cómo pulverizar Nasodren®

7. Mantenga la cabeza erguida, no la incline hacia delante ni hacia atrás. Inserte la boquilla de pulverización en el orificio nasal derecho. Inspire profundamente, contenga la respiración durante unos instantes (de 3 a 5 segundos) y

- aplique la solución en la fosa nasal derecha presionando la boquilla de pulverización una sola vez. Espire completamente por la boca una vez y después respire con normalidad. No inhale en el momento de pulverizar el producto.
8. A continuación repita el procedimiento descrito en el punto 7 anterior, en la fosa el orificio nasal izquierdo.
 9. Limpie la boquilla de pulverización con un pañuelo de papel limpio. Vuelva a colocar el tapón protector de la boquilla de pulverización.

Precauciones al utilizar el producto

Consulte a su médico si los síntomas no mejoran al cabo de 10 días o si empeoran después de 5 días. Consulte a su médico o farmacéutico si sufre algún efecto adverso o si ocurre algo inesperado que no esté contemplado en este prospecto.

Si necesita más información sobre el producto, pregunte a su farmacéutico.

Le recomendamos que no conduzca ni utilice máquinas en las 2 horas siguientes al uso de Nasodren®. Lo mejor es que utilice Nasodren® 2 horas antes de acostarse.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Unos pocos minutos después de la administración puede notar una breve sensación de picor leve y transitorio, una sensación de quemazón en la nasofaringe, estornudos, lagrimeo y un aumento en las secreciones nasales. Son signos de una respuesta positiva al producto y aunque pueden causar una ligera incomodidad durante un corto período, se trata de respuestas esperadas.

También puede producirse una descarga nasal de color rosado, que tampoco debe ser motivo de preocupación. Se recomienda sacar el producto de la nevera 2 o 3 minutos antes de la aplicación para reducir la intensidad de los efectos indeseables mencionados, que pueden deberse en parte al frío. El producto debe guardarse de nuevo en la nevera inmediatamente después del uso.

No inhale durante la pulverización, ya que los efectos antes mencionados podrían ser más intensos y de mayor duración.

En caso de sobredosis

En caso de aplicación excesiva o de pulverización repetida accidentales, puede ser útil el enjuague o la irrigación de la cavidad nasal a través de los orificios nasales con agua templada, así como los gargarismos con agua templada.

Otras precauciones recomendadas

Si se le olvida aplicar Nasodren® durante uno o más días, no se preocupe, puede seguir utilizando el producto uno o dos días más. No pulverice más de una vez al día para intentar compensar los días que olvidó hacerlo.

Si deja de utilizar Nasodren® antes del tiempo recomendado, puede que no se consigan los resultados esperados.

No utilice Nasodren® durante más de 14 días.

Aunque Nasodren® no se absorbe a través de las fosas nasales, le recomendamos que consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún medicamento que necesite receta.

Si está utilizando otros productos de administración nasal, debe dejar un tiempo mínimo de 2 horas entre el uso de cada uno de estos productos.

Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse a fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o paciente.

Si está usted embarazada o en periodo de lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar Nasodren®.

No hay datos disponibles sobre uso de Nasodren® durante el embarazo y la lactancia. Por consiguiente, si usted está embarazada o en periodo de lactancia, no debe utilizar Nasodren® a menos que se lo indique su médico.

Conservación y eliminación

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Mantener el envase original protegido de la luz y a una temperatura inferior a 25 °C.

Una vez preparada la solución, Nasodren® debe guardarse en el frigorífico, a una temperatura de 2 a 8 °C, y protegido de la luz.

La fecha de caducidad está impresa en la caja, en el vial de vidrio que contiene el polvo y en el frasco con agua.

No utilice el producto después de la fecha de caducidad impresa en la caja.

No utilizar la solución si han transcurrido más de 14 días desde su preparación.

Para el desecho del producto deberá tratarse como un residuo urbano.

 Hartington Pharmaceutical S.L.U.,
Avda. Ernest Lluch 32, TCM3, 6ª-3,
08302 Mataró, España

 IDENTIFICADOR ÚNICO DE PRODUCTO SANITARIO	 LÍMITE DE TEMPERATURA	 MARCADOR DE CONFORMIDAD EUROPEA	 PRECAUCIÓN
 RECYCLAGE	 PRODUCTO SANITARIO	 FECHA DE CADUCIDAD	 NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR
 MANTÉNASE FUERA DE LA LUZ DEL SOL	 NÚMERO DE CATALOGO	 CÓDIGO DE LOTE	 NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

Fecha de emisión: 10/03/2022

B10985-04

L6ES

100P10985D



0051